


# Face Shield Fabrication フェイスシールドキット 組立方法

ニューヨーク大学のオープンソースデザインより

Open Face PPE Project

[Covid19.taskforce@nyu.edu](mailto:Covid19.taskforce@nyu.edu)

CC BY 4.0 License No warranties

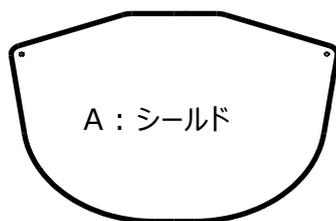

A : シールド



B : ヘッドバンド



C : ゴムストラップ

## セット内容 :

A : シールド

B : ヘッドバンド

C : ゴムストラップ (ゴムアレルギーのある方は直接肌に触れないようにしてください)  
各300個

### 1. Feed Elastic : ゴムストラップを取り付ける 図 1

Feed the elastic strap through the outer hole then through thinner hole back out.

図 1 のように、シールドの穴に外側からゴムストラップを通した後、内側の穴から外へ通します。


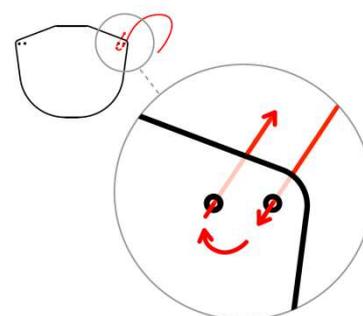


図 1

### 2. Knot Elastic : ゴムストラップの結び目を作る 図 2

With the elastic fed through both holes create a knot on the short end of the elastic to secure it. Tie the knot as close to the end of the elastic as possible.


内側の穴から外側に出したゴムストラップの先端に結び目を作ります。後でほどけないように、しっかりと大きく結んでください。

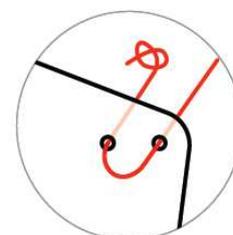

### 3. Feed + Knot Elastic : ゴムストラップを取付けて結ぶ 図 2

Repeat steps 1 and 2 on the holes on other side of the shield. Make sure to tie both knots on the outside of the shield.

シールドの反対側も同様に、1と2を繰り返します。左右それぞれの結び目がシールドの外側になるようにしてください。

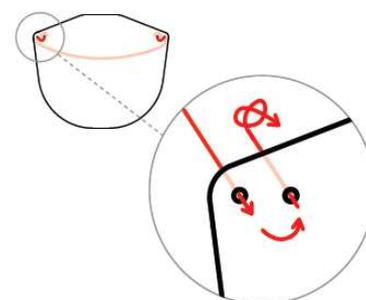

### 4. Attach Headband : 片側のヘッドバンドを取り付ける 図 2

With slits facing down, slide the middle tab on one end of the headband through the elastic loop on the inside of the shield.

ヘッドバンドの片方の端のスリット (切り目) を下に向けます。シールドの内側に通っているゴムストラップにスリット (切り目) を差し込みます。

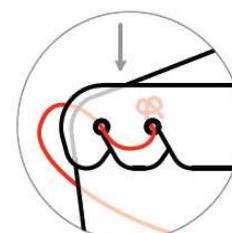


図 2

## 5. Curve Face Shield : フェイスシールドを曲げる 図3

The face shield will arrive flat with one end of the headband attached as pictured in image 1. Curve the plastic face shield and headband holding the loose end of the shield and headband together as pictured in image 2

図1で両端にヘッドバンドを取り付けたら、両端のフェイスシールドとヘッドバンドを持ち、図3の①・②のように曲げます。

## 6. Attach Headband : もう片方のヘッドバンドを取り付ける 図3

With slits facing down, slide the middle tab on one end of the headband through the elastic loop on the inside of the shield.

シールドに取り付けられていない方の端のスリット（切り目）を下に向け、シールドの内側に通っているゴムストラップに差し込みます。

## 7. Ready : 完成

Face shield should look like this when ready to wear. Slip mask over your head with elastic in the back and headband against the forehead.

図3の一番下の絵のような形になれば完成です。着用の際は、ヘッドバンドを額に固定し、ゴムストラップを頭の後ろに回します。サイズが合わない場合は、ゴムストラップで調整してください。

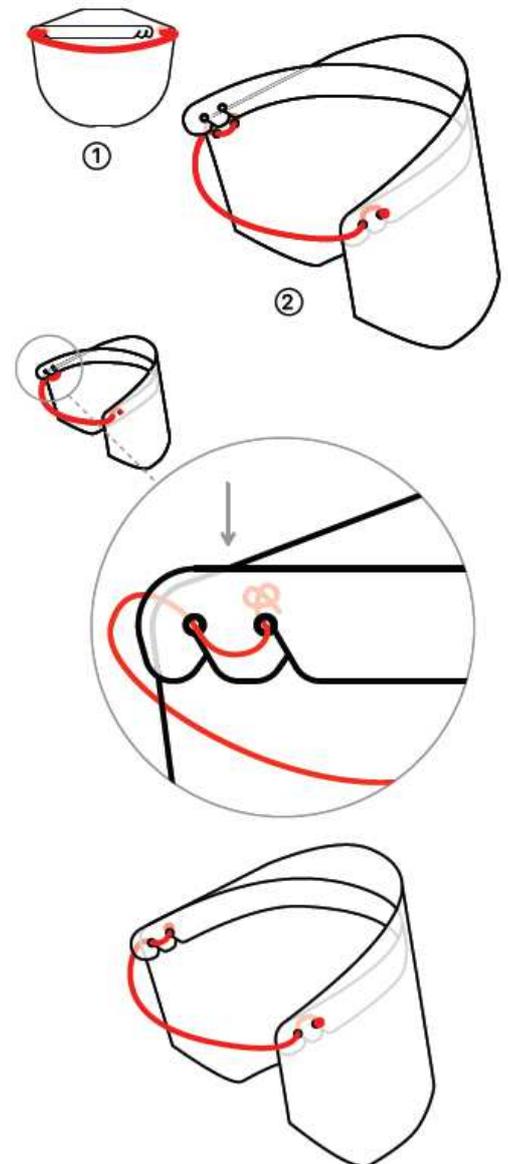


図3

注意：フェイスシールドの組立て・着用の際は、各部品でケガをしないように十分注意してください。

Acknowledgment : The authors thank teammates and NEW YORK UNIVERSITY.

謝辞：作成にご協力頂いたすべての方とオープンソースをご提供いただいたニューヨーク大学に感謝いたします。

製造国： 日本（MADE IN JAPAN）

製造責任者：  株式会社TSMマネジメント

兵庫県宝塚市中筋山手 4-2-21

Eメール： [info@tsmanagement.co.jp](mailto:info@tsmanagement.co.jp)